


## FAQ

### Wie verwende ich den Lollipop-Test richtig?

1. Öffnen Sie die Verpackung in der sich der Lollipop-Test befindet
2. Öffnen Sie den Lollipop indem Sie den Deckel abziehen
3. Das Schwämmchen, ca. 1 Zentimeter groß wird für ca. 2 Minuten unter die Zunge in den Mund gelegt (**Bitte nicht auf das Schwämmchen beißen oder daran kauen und es darf kein Speichel über den Test laufen, in beiden Fällen wird das Ergebnis verfälscht bzw. ungültig**)
4. Bitte achten Sie darauf, dass das Schwämmchen während der Zeit im Mund mit **ausreichend** Speichel versorgt wird
5. Anschließend wird der Test wieder mit dem Deckel verschlossen (Hygiene)
6. Legen Sie den Test vor sich hin
7. Das Testergebnis liegt nach wenigen Minuten vor
8. Das Testergebnis ist anschließend ablesbar
9. Das Ergebnis:

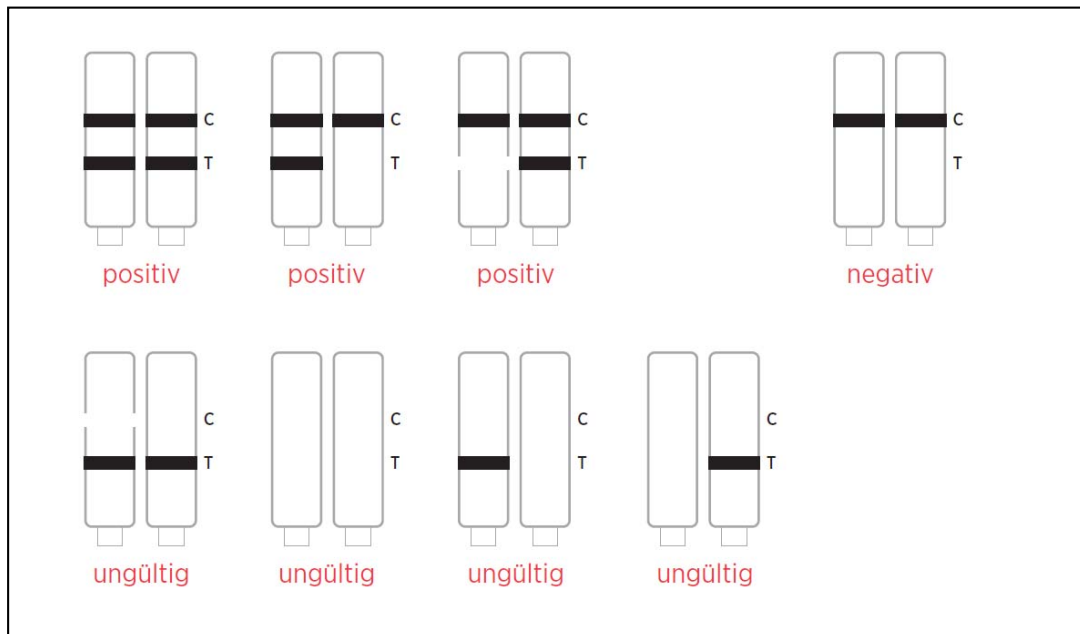

- **Auch ein schwacher Streifen ist ein gültiges Ergebnis !**
- **Produkte die den Speichel verändern (z.B. Zähneputzen und Mundspülungen) verfälschen das Ergebnis. Deshalb warten Sie z.B. nach dem Zähneputzen ca. 15 min bis zur Testung**